



INFORMATIONEN

Vorbereitung

Ablauf / Testung

Ergebnis



Schüler- Selbsttest



Ab dem 12.04.2021 gilt:



- Zugang zur Schule nur mit der Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten, die bestätigt, dass der Test negativ war. Dazu:
 - Verpackung des Tests aufklappen und auf der Innenseite: **Name / Datum / Unterschrift** vermerken. Liegt dieser Nachweis nicht vor, kann die Schule nicht betreten werden.
 - Ein „Nachtest“ in der Schule ist nicht vorgesehen. Dies ist aus logistischen Gründen (Anzahl der gelieferten Testkits) auch nur im absoluten Ausnahme- und Einzelfall möglich.
 - Bei einem positiven Testergebnis muss die Schule umgehend informiert werden. Dann erhalten Sie weitere Anweisungen.

Vorbereitung der Testung




- Erhalt des Testkits (im Normalfall in der Schule).
- Vor Beginn: Mehrmals die Nase schnäuzen und anschließend die Hände waschen.
- Ein Taschentuch parat legen.
- Die Testung an einem Tisch durchführen, da die Flüssigkeiten auf einer ebenen Oberfläche stehen sollten.
- Die Verpackungshinweise / Durchführungshinweise genau lesen. YouTube Video als Anleitung:
- <https://www.youtube.com/watch?v=NHF-qHUAe5w>

1. Schritt – Öffnen der Verpackung




- Das Extraktionsröhrchen in den Röhrchenständer der Verpackung drücken.
- **Öffnet die Extraktionslösung** und **schüttet diese in das Röhrchen**
- **VORSICHT:**
- Beim Öffnen die Behälter diese vom Gesicht weghalten und einen Kontakt der beiden Behälter vermeiden. Nichts verschütten. Die Behälter sollten nicht umfallen.

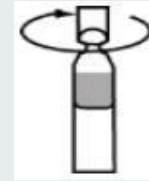


2. Schritt – Tupfer



- Nehmt das Stäbchen mit dem Tupfer aus der Verpackung. Greift dieses nur am Stiel.
- **Nicht** die weiche Tupferspitze mit den Händen berühren.

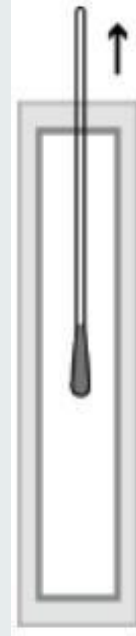

3. Schritt – Testung

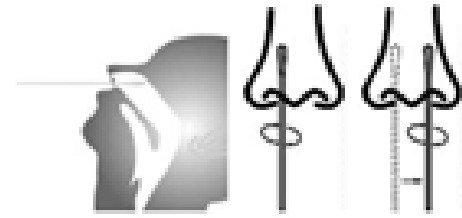

- **VORSICHT:** Dies kann sich unangenehm anfühlen. Führe den Tupfer nicht tiefer ein, wenn du einen starken Widerstand oder Schmerzen spürst.
- Führe den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein.
- Die Tupferspitze sollte **ca. 2,5 cm tief** vom Rand des Nasenlochs eingeführt werden. Drehe entlang der Schleimhaut im Nasenloch, so dass Schleim als auch Zellen gesammelt werden.
- Drehe den Tupfer 3-4 Mal und behalte ihn einige Sekunden im Nasenloch. Dann wiederholst du alles mit dem anderen Nasenloch.

4. Schritt – Tupfer in die Flüssigkeit




- Den Tupfer führst du nun mit der weichen Spitze in das Röhrchen mit der Flüssigkeit.
- **Drehe** den Tupfer nun **3-5 Mal**.
- Lasse den Tupfer **1 Minute** in der Flüssigkeit.
- Wenn du den Tupfer wieder rausziehst, drückst du mit zwei Fingern das Röhrchen zusammen, so dass die restliche Flüssigkeit vom Tupfer im Röhrchen bleibt. Lege den Tupfer auf ein Taschentuch.



5. Schritt – Testkassette



- Setze die Abdeckkappe auf das Röhrchen.

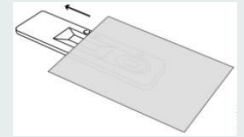

- Öffne den Beutel mit der Testkassette und lege sie auf den Tisch. Die Kassette muss sofort nach dem Öffnen verwendet werden!
- Drehe nun das Röhrchen um und gebe 3 Tropfen in die Vertiefung (dort steht der Buchstabe „S“). Dafür musst du das Röhrchen leicht drücken.

6. Schritt - Das Ergebnis



- Euer Ergebnis wird nach 15-20 Minuten angezeigt.
- Was passiert wenn der Test „positiv“ anzeigt?
- Ihr bleibt zu Hause.
- Ihr informiert die Schule und macht einen erneuten (PCR) Test bei eurem Hausarzt/eurer Hausärztin oder einem Testzentrum.
- Die Schule informiert das Gesundheitsamt.

Erste Hilfe -Maßnahmen



- **Keine Flüssigkeiten berühren oder schlucken.**
 - Falls dies passieren sollte: Die Haut gründlich mit Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: mit viel Wasser spülen, Kontaktlinsen entfernen und unverletztes Auge schützen. Schlucken/Einnehmen: Mund mit Wasser ausspülen.
- **In allen Fällen gilt: Sollten Irritationen oder Unwohlsein auftreten: Einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen.**